

InspiraChamber



Inhalatieprotocol dosisaerosol met InspiraChamber® met mondstuk voor kinderen

Naam: _____

Instructie uitgevoerd door: _____

Datum: _____

Patiënten informatie

- 1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

- 2. Verwijder de beschermdop van dosisaerosol.
- 3. Schudden en 3 doses wegspuiten.

Voor elk gebruik:

- 4. Verwijder de beschermdop van de dosisaerosol.
- 5. Langer dan 1 week niet gebruikt: schudden en 1 doses wegspuiten.
- 6. De mond moet leeg zijn.
- 7. Schud de dosisaerosol krachtig.
- 8. Plaats de dosisaerosol met de opening naar beneden en recht vooruit in de InspiraChamber®.
- 9. De dosisaerosol met de InspiraChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

- 10. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.
- 11. Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen.
- 12a. **De standaardmethode**
 - Druk de dosisaerosol 1 keer in.
 - Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen door de InspiraChamber®.
- 12b. **1-teug methode:** indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener:
 - Laat het kind volledig uitademen.
 - Druk de dosisaerosol 1 keer in bij het begin van de inademing
 - Laat het kind één keer langzaam en zo diep mogelijk inademen en vervolgens 10 seconden de adem vasthouden.

InspiraChamber



Inhalatieprotocol dosisaerosol met InspiraChamber® met mondstuk voor kinderen

- 13. Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig laten inhaleren.
- 14. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaerosol uit de Inspirachamber® halen. Herhaal vervolgens de instructie vanaf stap 7. Spuit niet meer dan 1 puffje in de Inspirachamber®
- 15. Verwijder de dosisaerosol van de Inspirachamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaerosol. Niet op de Inspirachamber®.
- 16. Na inhalatie mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of zo nodig iets eten of drinken

Schoonmaken

- 17. InspiraChamber® één maal per week schoonmaken.
- 18. Haal de InspiraChamber® uit elkaar. Verwijder de dop en het paarse achterstuk van de InspiraChamber®.
- 19. Dompel de onderdelen in een warm en schoon afwassopje gedurende 15 minuten.
- 20. De InspiraChamber® niet afspoelen en niet afdrogen.
- 21. Schud de onderdelen uit om extra water te verwijderen.
- 22. Laat de Inspirachamber® en onderdelen aan de lucht drogen in een verticale positie. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de InspiraChamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 23. Bereken wanneer de dosisaerosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaerosol staat hoeveel doses er in zitten. Turf de doses en noteer de datum van aanbreken. Sommige dosisaerosolen hebben een teller.
- 24. Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.
- 25. De InspiraChamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 26. Op www.mijnvoorzetkamer.nl vindt u meer informatie over de InspiraChamber®.