


# InspiraChamber

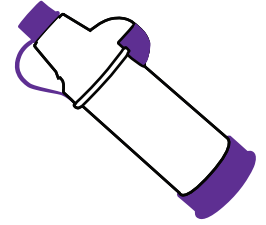

Inhalatieprotocol dosisaerosol InspiraChamber® met masker voor kinderen InspiraMask of Soothermask

Naam: \_\_\_\_\_

Instructie uitgevoerd door: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Het masker alleen gebruiken als mondstuk niet kan.**

**Let op een goede pasvorm. Kies een maat masker afgestemd op het kind.**

Een indicatie hiervoor is:

Vanaf leeftijd 0 tot 6 maanden: maat small.

Vanaf leeftijd 6 maanden tot 4 jaar: maat medium.

Vanaf leeftijd 4 jaar waarbij bewuste inhalatie met mondstuk niet mogelijk is: volwassen masker of kindermasker medium als de pasvorm daarvan beter is.

## Patiënten informatie

- 1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie

## Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

- 2. Verwijder de beschermdop van dosisaerosol.
- 3. Schudden en 3 doses wegsputten.

Voor elk gebruik:


- 4. Verwijder de beschermdop van de dosisaerosol.
- 5. Langer dan 1 week niet gebruikt: schudden en 1 doses wegsputten.
- 6. De mond moet leeg zijn.
- 7. Schud de dosisaerosol krachtig.
- 8. Plaats de dosisaerosol met de opening naar beneden en recht vooruit in de InspiraChamber®.
- 9. De dosisaerosol met de InspiraChamber® is nu klaar voor gebruik.

**Let op! Onderstaande stappen zijn afhankelijk van welk masker u gebruikt; de InspiraMask (stappen 10a tm 15a) of de SootherMask (stappen 10b tm 15b).**

De inhalatie met InspiraMask (bevat géén opening voor een fopspeen!)

- 10a. Zet de InspiraMask voorzichtig op de InspiraChamber® zodat deze goed aansluit.
- 11a. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.

# InspiraChamber

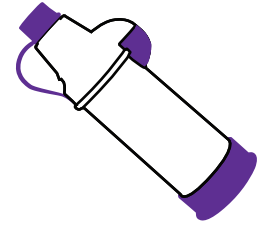


Inhalatieprotocol dosisaerosol InspiraChamber® met masker voor kinderen InspiraMask of Soothermask

- 12a. Houd de InspiraChamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.
- 13a. Druk de dosisaërosol 1 keer in.
  - Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen door de InspiraChamber®.
  - Masker goed aangesloten houden en niet huilen. De SealVision visuele indicator beweegt zichtbaar.
  - Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig laten inhaleren (indien mogelijk).
- 14a. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaerosol met de InspiraChamber® krachtig schudden. Herhaal vervolgens vanaf stap 11a.
- 15a. Spuit niet meer dan één pufje per keer in de InspiraChamber®.

## De inhalatie met SootherMask (bevat wél een opening voor een fopspeen!)

- 10b. Plaats de fopspeen van het kind in de SootherMask.
- 11b. Laat het kind op de speen zuigen, zodat het masker een effectieve afdichting heeft op het gezicht.
- 12b. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.
- 13b. Houd de InspiraChamber® horizontaal en sluit de InspiraChamber® voorzichtig aan op het masker. Zorg dat het SootherMask aangesloten blijft op het gezicht over mond en neus van het kind.
- 14b. Druk de dosisaërosol 1 keer in.
  - Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen door de InspiraChamber®.
  - Masker goed aangesloten houden en niet huilen. De SealVision visuele indicator beweegt zichtbaar.
  - Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig laten inhaleren (indien mogelijk).
- 15b. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaerosol met de InspiraChamber® krachtig schudden. Herhaal vervolgens vanaf stap 11b. Spuit niet meer dan één pufje in de InspiraChamber®.

# InspiraChamber

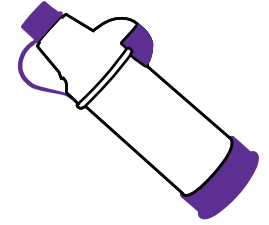

Inhalatieprotocol dosisaerosol InspiraChamber® met masker voor kinderen InspiraMask of Soothermask

- 16. Verwijder het masker van de InspiraChamber®.
- 17. Verwijder de dosisaerosol uit de InspiraChamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaerosol en paarse beschermdop terug op de InspiraChamber®.
- 18. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken. Of indien dit niet mogelijk is, iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

## Schoonmaken

- 19. InspiraChamber® één maal per week schoonmaken.
- 20. Haal de InspiraChamber® uit elkaar. Verwijder de dop en het paarse achterstuk en het masker van de InspiraChamber®.
- 21. Dompel de onderdelen in een warm en schoon afwassopje gedurende 15 minuten.
- 22. De InspiraChamber® niet afspoelen en niet afdrogen.
- 23. Schud de onderdelen uit om extra water te verwijderen.
- 24. Laat de InspiraChamber® en onderdelen aan de lucht drogen in een verticale positie. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de InspiraChamber® weer in elkaar zet.

## Aandachtspunten

- 25. Bereken wanneer de dosisaerosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaerosol staat hoeveel doses er in zitten. Turf de doses en noteer de datum van aanbreken. Sommige dosisaerosolen hebben een teller.
- 26. Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.
- 27. De InspiraChamber® eenmaal per jaar vervangen.

## Tenslotte

- 28. Op [www.mijnvoorzetkamer.nl](http://www.mijnvoorzetkamer.nl) vindt u meer informatie over de InspiraChamber®.