


InspiraChamber

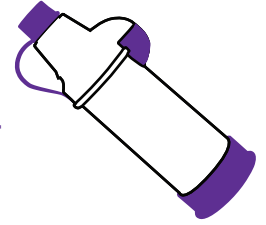

Inhalatieprotocol dosisaerosol InspiraChamber® met grootmasker

Naam: _____

Instructie uitgevoerd door: _____

Datum: _____

Let op: masker alleen gebruiken als mondstuk niet kan

Patiënten informatie

- 1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

- 2. Verwijder de beschermdop van dosisaerosol.
- 3. Schudden en 3 doses wegspuiten.


Voor elk gebruik:

- 4. Verwijder de beschermdop van de dosisaerosol.
- 5. Langer dan 1 week niet gebruikt: schudden en 1 doses wegspuiten.
- 6. De mond moet leeg zijn.
- 7. Schud de dosisaerosol krachtig.
- 8. Plaats de dosisaerosol met de opening naar beneden en recht vooruit in de InspiraChamber®.
- 9. De dosisaerosol met de InspiraChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

- 10. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
- 11. Houd de InspiraChamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus.
- 12. Adem volledig uit.
 - Druk de dosisaerosol 1 keer in bij het begin van een rustige inademing.
 - 5 keer rustig in- en uitademen door de InspiraChamber®. Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig inhaleren. Het masker goed aangesloten houden totdat de patiënt klaar is.

InspiraChamber

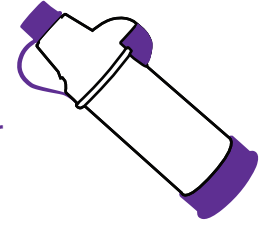

Inhalatieprotocol dosisaerosol InspiraChamber® met grootmasker

- 13. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaerosol uit de InspiraChamber® halen. Herhaal vervolgens vanaf stap 7. Spuit niet meer dan één pufje in de InspiraChamber®.
- 14. Verwijder de dosisaerosol uit de InspiraChamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaerosol en de paarse beschermdop op de InspiraChamber®.
- 15. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken. Of indien nodig iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

Schoonmaken

- 16. InspiraChamber® één maal per week schoonmaken.
- 17. Haal de InspiraChamber® uit elkaar. Verwijder de dop en het paarse achterstuk en het masker van de InspiraChamber®.
- 18. Dompel de onderdelen in een warm en schoon afwassopje gedurende 15 minuten.
- 19. De InspiraChamber® niet afspoelen en niet afdrogen.
- 20. Schud de onderdelen uit om extra water te verwijderen.
- 21. Laat de InspiraChamber® en onderdelen aan de lucht drogen in een verticale positie. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de InspiraChamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 22. Bereken wanneer de dosisaerosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaerosol staat hoeveel doses er in zitten. Turf de doses en noteer de datum van aanbreken. Sommige dosisaerosolen hebben een teller.
- 23. Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.
- 24. De InspiraChamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 25. Op www.mijnvoorzetkamer.nl vindt u meer informatie over de InspiraChamber®.